

De afnameset is beperkt houdbaar.
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Het aanleveren van de afnameset kan op twee manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

1. De afnameset afgeven bij het dichtstbijzijnde Frontoffice of afhaalpunt in uw ziekenhuis.
2. De afnameset zelf afleveren bij de balie van Labmicta. Voor adres zie voorkant envelop.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag
08.00-18.00 uur.

Let op: Afnamesets dienen, na afname, op dezelfde dag voor 16.30 uur op het Laboratorium Microbiologie aanwezig te zijn.

N.B. Niet versturen via PostNL.

NIET IN KOELKAST !

Niet versturen via de post

BLOED Quantiferon TB gold Plus test

**Afgeven dichtstbijzijnde
afhaalpunt
zie www.labmicta.nl**

NIET IN KOELKAST !

z-Doc, versie 4

BLOED Quantiferon TB gold Plus test

Instructies voor afname:

Algemeen:

Afnameset t.b.v. afnemen bloedmonsters voor Quantiferon TB Gold Plus test (afname 4 buizen).

Afname:

Zie voor uitgebreide instructies het aanvraagformulier Quantiferon TB Gold Plus test.

Aanvraagformulier:

Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

Belangrijke aspecten zijn:

- Volledige NAW-gegevens inclusief BSN en/of PID nummer patiënt.
- Datum/tijd afname.
- Aanvragend arts.
- Relevante klinische gegevens/indicatie.

Bewaarcondities tot transport:

Bewaren bij kamertemperatuur.

Onderzoeksduur:

Maximaal 8 dagen.



Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden. Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:

- Plaats de buizen in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.
- De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.
- De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.
- Dit instructieformulier terugplaatsen in de zegroene envelop, voor de kartonnen inlay.
- De afnameset zo snel mogelijk afgeven bij het Frontoffice of afhaalpunt in uw ziekenhuis.