

De afnameset is beperkt houdbaar.
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Het aanleveren van de afnameset kan op twee manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

1. De afnameset afgeven bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Voor actuele lichtingstijden bij huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen verwijzen we naar onze website: www.labmicta.nl
2. De afnameset zelf afleveren bij de balie van Labmicta. Voor adres zie voorkant envelop.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur.
Na 18.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen is er de mogelijkheid om de afnameset in de daarvoor bestemde brievenbus aan de voorgevel van het laboratorium te deponeren.
N.B. Niet versturen via PostNL.

Niet versturen via de post

 **BLOED SEROLOGIE**

**Afgeven dichtstbijzijnde
afhaalpunt
zie www.labmicta.nl**

z-Doc, versie 3

 **BLOED SEROLOGIE**

Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset zie instructies achterzijde of www.labmicta.nl

Instructies voor afname:

Algemeen:

Stolbuis (vacutainer) t.b.v. afnemen bloedmonster voor:

- Serologisch onderzoek.
- Q-koorts onderzoek.

Materiaal:

Indicatie voor desinfectie van de dop van stolbuis voor bloedafname???

- Desinfecteer de dop van de buis met alcohol 70%.
- Laat gedurende 1 minuut inwerken.
- Desinfecteer de huid van de patiënt en laat 1 minuut inwerken.
- Neem met behulp van het Vacutainersysteem bloed af, direct in de buis.

Aanvraagformulier:

Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

Bewaarcondities tot transport:

Voor een optimaal resultaat bewaren in de koelkast (2-8°C) en binnen 24 uur insturen.

Voor aanvullende informatie zie het Vademecum van Labmicta (www.labmicta.nl/vademecum).

**Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden.
Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:**

- **Plaats het buisje in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.**
- **De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.**
- **De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.**
- **Dit instructieformulier terugplaatsen in de zeegroene envelop, voor de kartonnen inlay.**
- **De afnameset zo snel mogelijk afgeven voor transport.**
- **Voor transport in de koelkast bewaren.**
- **Bij de huisartsenpraktijk zijn de transportmogelijkheden naar Labmicta bekend.**
- **Voor een optimaal resultaat binnen 24 uur retourneren naar Labmicta.**