

De afnameset is beperkt houdbaar.
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Het aanleveren van de afnameset kan op twee manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

1. De afnameset afgeven bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Voor actuele lichtingstijden bij huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen verwijzen we naar onze website: www.labmicta.nl
2. De afnameset zelf afleveren bij de balie van Labmicta. Voor adres zie voorkant envelop.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur.
Na 18.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen is er de mogelijkheid om de afnameset in de daarvoor bestemde brievenbus aan de voorgevel van het laboratorium te deponeren.
N.B. Niet versturen via PostNL.

Niet versturen via de post

F E-SWAB XS (oranje dop)

**Afgeven dichtstbijzijnde
afhaalpunt
zie www.labmicta.nl**

z-Doc, versie 4

F E-SWAB XS (oranje dop)


Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset zie instructies achterzijde of www.labmicta.nl

Instructies voor afname:

Algemeen:

Afnameset E-Swab XS ten behoeve van:

- Algemeen bacteriologisch, gist/schimmels, virologisch onderzoek van onder andere nasofarynx, conjunctiva en blaasjesvocht.
- Onderzoek op Bordetella (para) pertussis (kinkhoest) van nasofarynx.
- SOA panel (MSP) bij high risk mannen van urethra.

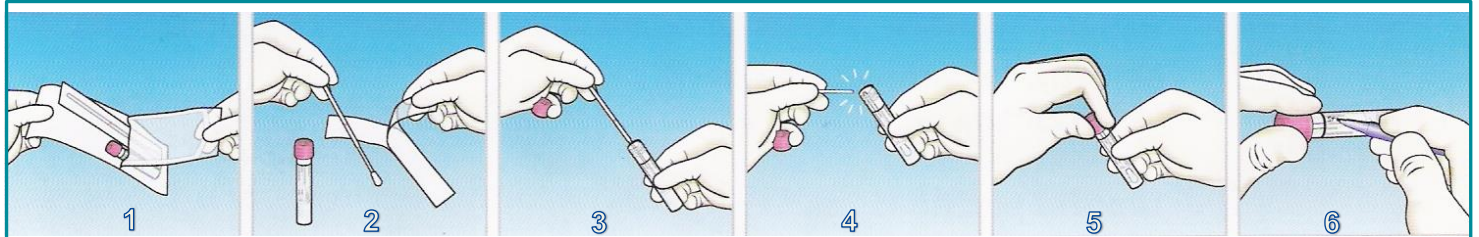

1. Open de verpakking.
2. Haal de E-swab XS uit de verpakking; **niet onder het rode streepje op de stok vastpakken**. Neem het patiëntmateriaal af.
3. Open het buisje en steek de E-swab XS erin.
4. Breek de E-swab XS af bij het breekpunt (zie rode streep op het stokje).
5. Draai de roze dop op het buisje tot dit goed gesloten is. De borstelkop zit nu in het medium.
6. Schrijf/plak de patiënt gegevens op het buisje.

Materiaal:

Afname nasofarynx:

- Neem materiaal af uit de nasofarynx m.b.v. de E-swab XS (de E-swab Regular is nl. te dik om tot in de nasofarynx te komen).
- Breng de E-swab XS over de neus bodem tot in de nasofarynx en draai de wat voorzichtig om zijn as.



Afname urethra:

- Breng de E-swab XS 2 tot 4 cm in de urethra en draai de swab 3 tot 5 seconden rond.

Afname conjunctiva:

- Trek met een gehandschoende vinger het onderste ooglid naar beneden zodat het wijkt van het oog.
- Strijk de binnenkant van het ooglid in de richting van de neus uit.

Aanvraagformulier:

Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

Bewaarcondities tot transport:

Voor een optimaal resultaat bewaren in de koelkast (2-8°C) en binnen 24 uur insturen.
Voor kweek op gonococcen; s.v.p. vooraf overleggen met laboratorium.

Voor aanvullende informatie zie het Vademecum van Labmicta (www.labmicta.nl/vademecum).

Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden. Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:

- Plaats de E-swab in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.
- De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.
- De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.
- Dit instructieformulier terugplaatsen in de zeegroene envelop, voor de kartonnen inlay.
- De afnameset zo snel mogelijk afgeven voor transport.
- Voor transport in de koelkast bewaren.
- Bij de huisartsenpraktijk zijn de transportmogelijkheden naar Labmicta bekend.
- Voor een optimaal resultaat binnen 24 uur retourneren naar Labmicta.