

De afnameset is beperkt houdbaar.  
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Het aanleveren van de afnameset kan op twee manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

1. De afnameset afgeven bij het dichtstbijzijnde Frontoffice of afhaalpunt in uw ziekenhuis.
2. De afnameset zelf afleveren bij de balie van Labmicta. Voor adres zie voorkant envelop.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag  
08.00-18.00 uur.

Na 18.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen is er de mogelijkheid om de afnameset in de daarvoor bestemde brievenbus aan de voorgevel van het laboratorium te deponeren.

N.B. Niet versturen via PostNL.

**Niet versturen via de post**

**E-SWAB VIRUS** (rode dop)

**Afgeven dichtstbijzijnde  
afhaalpunt  
zie [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)**

**z-Doc, versie 3**

**E-SWAB VIRUS** (rode dop)

Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset zie instructies achterzijde of [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)

## Instructies voor afname:

### Algemeen:

Flexibele wattenstok en steriel buisje met UTM\_RT medium en rode dop voor het vergaren van materiaal t.b.v. virusdiagnostiek.


Geschikt voor het uitstrijken van neus, keel, oog, blaasjesvocht en anus. Geschikt voor detectie van alle verwekkers uit het moleculair respiratoire panel (MRP).

Voor grotere hoeveelheden materiaal of urine: Gebruik afnameset sputum/container steriel of urine (moleculair SOA panel; MSP)

Keel- en neusuitstrijken.

Bij luchtweginfecties komen uitsluitend uitstrijken uit de eerste ziektedagen in aanmerking voor onderzoek.

### Afname:

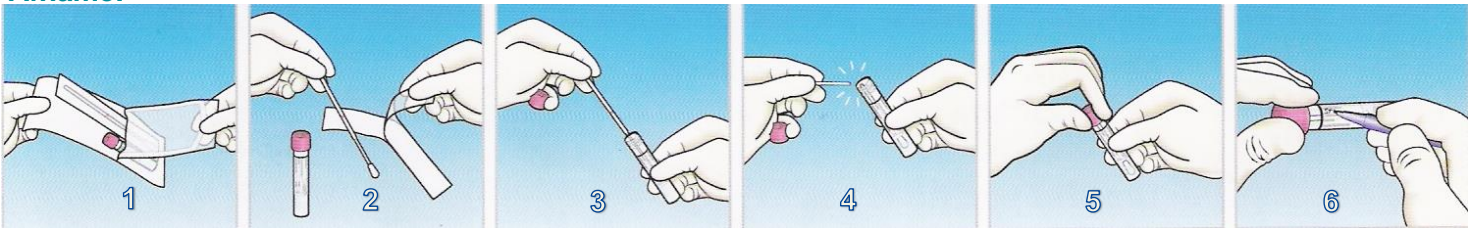

1. Open de verpakking.
2. Haal de E-swab uit de verpakking; **niet onder het rode streepje op de stok vastpakken**. Neem het patiëntmateriaal af.
3. Open het buisje en steek de E-swab erin.
4. Breek de E-swab af bij het breekpunt (zie rode streep op het stokje).
5. Draai de rode dop op het buisje tot dit goed gesloten is. De borstelkop zit nu in het medium.
6. Schrijf de patiënt gegevens op het buisje.

### Aanvraagformulier:

Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

Belangrijke aspecten zijn:

- Volledige NAW-gegevens inclusief BSN en/of PID nummer patiënt.
- Datum/tijd afname.
- Relevante klinische gegevens/indicatie.
- Aard/herkomst materiaal.
- Aanvragend arts.
- Eerste ziektedag.
- Welke antibiotica en sinds wanneer.
- Gevraagd(e) onderzoek(en).

### Bewaarcondities tot transport:

Koelkast 2-8°C

Voor een optimaal resultaat binnen 24 uur insturen.

Ongebruikt medium kan bewaard worden bij kamertemperatuur (let op vervaldatum).

### Onderzoeksduur:

Afhankelijk van het gevraagde onderzoek.

**Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden. Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:**

- Plaats de E-swab in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.
- De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.
- De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.
- Dit instructieformulier terugplaatsen in de zegroene envelop, voor de kartonnen inlay.
- De afnameset zo snel mogelijk afgeven bij het Frontoffice of afhaalpunt in uw ziekenhuis.