

De afnameset is beperkt houdbaar.
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Het aanleveren van de afnameset kan op twee manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

1. De afnameset afgeven bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Voor actuele lichtingstijden bij huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen verwijzen we naar onze website: www.labmicta.nl
2. De afnameset zelf afleveren bij de balie van Labmicta. Voor adres zie voorkant envelop.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur.
Na 18.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen is er de mogelijkheid om de afnameset in de daarvoor bestemde brievenbus aan de voorgevel van het laboratorium te deponeren.
N.B. Niet versturen via PostNL.

Niet versturen via de post

J PUNCTAAT

**Afgeven dichtstbijzijnde
afhaalpunt
zie www.labmicta.nl**

z-Doc, versie 4

J PUNCTAAT

Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset zie instructies achterzijde of www.labmicta.nl

Instructies voor afname:

Algemeen:

Vacuüm opvangbuis voor vloeibare pussen ten behoeve van Algemeen bacteriologisch, gist/schimmel en Mycobacterium onderzoek.

Materiaal:

Na desinfectie van de vacuette dop en de huid, de huid aspireren van materiaal met behulp van spuit en naald. Materiaal in vacuette spuiten zonder de dop van de vacuette te verwijderen (inhoud van de vacuette is anaeroob, zonder zuurstof). Indien het materiaal niet overgespoten kan worden in de vacuette omdat het volume te klein is, vul dan aan met steriel fysiologisch zout of laat het materiaal in de spuit zitten. Verwijder de naald en sluit af met een daarvoor geschikte dop.

Aanvraagformulier:

Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

Bewaarcondities tot transport:

Voor een optimaal resultaat bewaren in de koelkast (2-8°C) en binnen 24 uur insturen.

Voor aanvullende informatie zie het Vademecum van Labmicta (www.labmicta.nl/vademecum).

Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden. Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:

- Plaats de vacuette in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.
- De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.
- De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.
- Dit instructieformulier terugplaatsen in de zeegroene envelop, voor de kartonnen inlay.
- De afnameset zo snel mogelijk afgeven voor transport.
- Voor transport in de koelkast bewaren.
- Bij de huisartsenpraktijk zijn de transportmogelijkheden naar Labmicta bekend.
- Voor een optimaal resultaat binnen 24 uur retourneren naar Labmicta.