

De afnameset is beperkt houdbaar.  
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Het aanleveren van de afnameset kan op twee manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

1. De afnameset afgeven bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Voor actuele lichtingstijden bij huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen verwijzen we naar onze website: [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)
2. Het verzendmateriaal zelf afleveren bij de balie van Labmicta. Voor adres zie voorkant envelop.  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur.  
Na 18.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen is er de mogelijkheid om de afnameset in de daarvoor bestemde brievenbus aan de voorgevel van het laboratorium te deponeren.  
N.B. Niet versturen via PostNL.

Niet versturen via de post

**D URINE (MSP)**

**Afgeven dichtstbijzijnde  
afhaalpunt  
zie [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)**

z-Doc, versie 4

**D URINE (MSP)**

Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset zie instructies achterzijde of [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)

## Instructies voor afname:

### Algemeen:

Urine ten behoeve van Moleculair SOA Panel (MSP) bij een man. Voor Moleculair SOA Panel (MSP) bij een vrouw dient een (vagina) uitstrijk te worden afgenomen (zie E-swab regular roze dop). Indien het afnemen van een uitstrijk bij de vrouw niet mogelijk is, kan urine worden afgenomen.

Tevens geschikt voor insturen urine voor onderzoek op Mycobacterium, Cytomegalovirus, moleculair onderzoek en antigeentest op Legionella of Pneumokokken.

### Materiaal:

Bij voorkeur de eerste ochtendurine (plas) nemen. Wanneer dit niet mogelijk is dan urine afnemen nadat drie uur niet geplast is.

Voor de urine een lege steriele container nemen.

### Afname bij de vrouw:

#### Indien uitstrijk niet mogelijk is!

- De schaamstreek (omgeving en de binnenkant van de schaamlippen) **niet** wassen.
- Spreid met de vingers de schaamlippen (zodat de urine niet langs de huid kan lopen).
- De container volplassen met het **eerste deel** van de urine, tot 1 cm onder de rand.\*\*

#### Afname bij de man:

- De penis **niet** wassen.
- Schuif de voorhuid naar achteren.
- De container volplassen met het **eerste deel** van de urine, tot 1 cm onder de rand.\*\*

\*\* als het te lastig is om rechtstreeks in de container te plassen dan in een goed schoongemaakt potje of bakje plassen, maar een heel klein beetje, (15ml) en de opgevangen urine direct overschenken in de laboratoriumcontainer.

### Aanvraagformulier:

Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

### Bewaarcondities tot transport:

Voor een optimaal resultaat bewaren in de koelkast (2-8°C ) en binnen 24 uur insturen.

Voor aanvullende informatie zie het Vademecum van Labmicta ([www.labmicta.nl/vademecum](http://www.labmicta.nl/vademecum)).

### Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden. Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:

- **Sluit de container goed af.**
- **Plaats de container in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.**
- **De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.**
- **De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.**
- **Dit instructieformulier terugplaatsen in de zeegroene envelop, voor de kartonnen inlay.**
- **De verzendenvolplassen zo snel mogelijk afgeven bij de huisartsenpraktijk, voor transport in de koelkast bewaren.**
- **Bij de huisartsenpraktijk zijn de transportmogelijkheden naar Labmicta bekend.**
- **Voor een optimaal resultaat binnen 24 uur retourneren naar Labmicta.**