

Deze afnameset is beperkt houdbaar.

Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Afnamesets dienen na afname, binnen 3 uur en voor 16.00 uur op het Laboratorium Microbiologie aanwezig te zijn.

**Bij aankomst laboratorium  
direct verwerken!!**

Niet versturen via de post

**HELICOBACTERMEDIUM VOOR MAAGBIOPT**

**Na afname, binnen 3 uur  
afgeven bij Labmicta**

**Bij aankomst laboratorium  
direct verwerken!!**

**z-Doc, versie 4**

**HELICOBACTERMEDIUM VOOR MAAGBIOPT**

Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset zie instructies achterzijde of [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)

## Instructies voor afname:

### Algemeen:

Afnameset t.b.v. insturen maagbiopt voor onderzoek naar Helicobacter Pylori.

### Aanvraagformulier:

Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

Belangrijke aspecten zijn:

- Volledige NAW-gegevens inclusief BSN en/of PID nummer patiënt
- Datum/tijd afname.
- Relevante klinische gegevens/indicatie.
- Aard/herkomst materiaal.
- Aanvragend arts.
- Eerste ziekte dag.
- Welke antibiotica en sinds wanneer.
- Gevraagd(e) onderzoek(en).

### Bewaarcondities tot gebruik:

Koelkast 2-8°C

### Bewaarcondities tot transport:

Koelkast 2-8°C

Het materiaal moet, na afname, binnen 3 uur bij Labmicta afgegeven zijn.

### Onderzoeksduur:

10 dagen.

**Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden. Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:**

- Plaats het buisje in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.
- De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.
- De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.
- Dit instructieformulier terugplaatsen in de zegroene envelop, voor de kartonnen inlay.
- De afnameset binnen 3 uur afgeven bij Labmicta.