

De afnameset is beperkt houdbaar.
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Het aanleveren van de afnameset kan op twee manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

1. De afnameset afgeven bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Voor actuele lichte tijden bij huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen verwijzen we naar onze website: www.labmicta.nl
2. De afnameset zelf afleveren bij de balie van Labmicta. Voor adres zie voorkant envelop.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur.
Na 18.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen is er de mogelijkheid om de afnameset in de daarvoor bestemde brievenbus aan de voorgevel van het laboratorium te deponeren.
N.B. Niet versturen via PostNL.

Niet versturen via de post

 **E-SWAB Regular** (roze dop)

Afgeven dichtstbijzijnde
afhaalpunt
zie www.labmicta.nl

z-Doc, versie 5

 **E-SWAB Regular** (roze dop)

Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset zie instructies achterzijde of www.labmicta.nl

Instructies voor afname:


Algemeen:

Afnameset E-swab Regular ten behoeve van:

- Voor moleculaire SOA panel (MSP) bij vrouwen.
- Voor algemeen bacteriologisch onderzoek van o.a. ogen, huid, keel, neus, rectum, vagina, cervix en wonden.
- Voor virologisch onderzoek van onder andere conjunctiva, keel, neus, blaasjesvocht en rectum,
- Voor aanvraag op Bijzonder resistente micro-organismen, BRMO en VRE (voor MRSA screening, gebruik MRSA afnameset).

NB:

1. De E-swab is niet geschikt als houder voor het transport van grote hoeveelheden materiaal zoals pus, afscheiding of secret. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van vacuette (afnameset J, punctaat) of steriele container (afnameset I, sputum/container steriel).
2. SOA panel (MSP) bij **mannen**: urine in steriele container (afnameset D, urine MSP), of urethra uitstrijk met de E-swab XS (oranje dop, afnameset E).

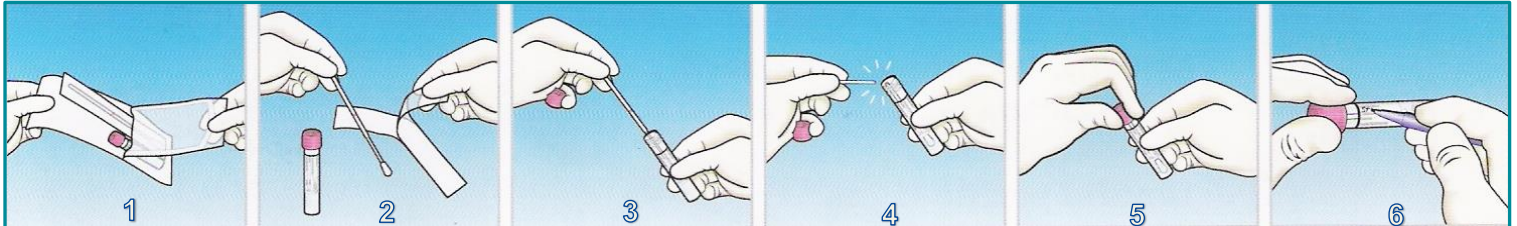

1. Open de verpakking.
2. Haal de E-swab Regular uit de verpakking; **niet onder het rode streepje op de stok vastpakken**. Neem het patiëntmateriaal af.
3. Open het buisje en steek de E-swab Regular erin.
4. Breek de E-swab Regular af bij het breekpunt (zie rode streep op het stokje).
5. Draai de roze dop op het buisje tot dit goed gesloten is. De borstelkop zit nu in het medium.
6. Schrijf /plak de patiënt gegevens op het buisje.

Materiaal:

Afname moleculaire SOA diagnostiek bij vrouwen:

- Cervix-uitstrijk: Breng de E-swab regular (roze dop) in de endocervix tot de swab niet meer te zien is en draai het stokje 3-5 seconden rond. Met dezelfde swab vervolgens de fornix posterior en eventueel aanwezig vaginaal vocht op het speculum uitstrijken
- Vagina (zelf) uitstrijk: Breng de E-swab 2 à 5 cm in de schede en strijk 10 à 15 seconden goed langs de vaginawanden.

Afname algemeen bacteriologisch onderzoek

van o.a. ogen, huid, keel, neus, rectum, vagina, cervix en wonden:

- Strijk het gewenste gebied (huid, slijmvlies, wond etc.) uit met de E-swab regular (roze dop)

Aanvraagformulier:

Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

Bewaarcondities tot transport:

Voor een optimaal resultaat bewaren in de koelkast (2-8°C) en binnen 24 uur insturen.
Voor kweek op gonococcen; s.v.p. vooraf overleggen met laboratorium.

Voor aanvullende informatie zie het Vademecum van Labmicta (www.labmicta.nl/vacemedum)

Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden. Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:

- Plaats de E-swab in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.
- De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.
- De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.
- Dit instructieformulier terugplaatsen in de zeegroene envelop, voor de kartonnen inlay.
- De afnameset zo snel mogelijk afgeven voor transport.
- Voor transport in de koelkast bewaren.
- Bij de huisartsenpraktijk zijn de transportmogelijkheden naar Labmicta bekend.
- Voor een optimaal resultaat binnen 24 uur retourneren naar Labmicta.