

De afnameset is beperkt houdbaar.
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Het aanleveren van de afnameset kan op twee manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

1. De afnameset afgeven bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Voor actuele lichtingstijden bij huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen verwijzen we naar onze website: www.labmicta.nl
2. De afnameset zelf afleveren bij de balie van Labmicta. Voor adres zie voorkant envelop.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur.
Na 18.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen is er de mogelijkheid om de afnameset in de daarvoor bestemde brievenbus aan de voorgevel van het laboratorium te deponeren.
N.B. Niet versturen via PostNL.

VOL

Niet versturen via de post



Vaginale afnameset

**Afgeven dichtstbijzijnde
afhaalpunt
zie www.labmicta.nl**

Leeg

z-Doc, versie 2



Vaginale afnameset

Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset zie instructies achterzijde of www.labmicta.nl

Instructies voor afname

Algemeen:

Vaginale afnameset bestaande uit Aptima-swab en E-Swab regular ten behoeve van o.a.:

- Fluor vaginalis (algemeen bacteriologische kweek inclusief bacteriële vaginose PCR (BV); BV van 12-55 jaar)
- Gistkweek
- Moleculaire SOA panel (MSP) bij vrouwen
- Voor kweek op *Neisseria gonorrhoeae*; s.v.p. vooraf overleggen met het laboratorium (i.v.m. transportcondities)

Onderzoek	Benodigde swab(s)*
Algemeen bacteriologisch, incl BV (Beide swabs gebruiken!)	
Overige onderzoeken zoals o.a. kweek op gisten en/of moleculair SOA panel.	


* Van de uitstrijk met de E-swab Regular kunnen meerdere onderzoeken worden uitgevoerd. Het is dus niet nodig meerdere E-swabs Regular af te nemen wanneer meerdere onderzoeken worden aangevraagd.

Afname materiaal:

- Cervix-uitstrijk: breng de benodigde swab in de endocervix tot de swab niet meer zichtbaar is en draai het stokje 3-5 seconden rond. Met dezelfde swab vervolgens de fornix posterior en eventueel aanwezig vaginaal vocht op het speculum uitstrijken.
- Vagina (zelf)uitstrijk: breng de benodigde swab 2 à 5 cm in de schede en strijk 10-15 seconden goed langs de vaginawanden.

Instructie gebruik E-swab Regular (roze dop) en Aptima-swab:

1. Open de verpakking.
2. Haal de swab uit de verpakking; **niet onder het rode (E-swab Regular) of zwarte (Aptima-swab) streepje op de stok vastpakken**. Neem het patiëntmateriaal af.
3. Open het buisje en steek de swab erin.
4. Breek de swab af bij het breekpunt (zie rode streep E-swab Regular of zwarte streep Aptima-swab op het stokje).
5. Draai de dop recht op het buisje tot dit goed gesloten is. De borstelkop zit nu in het medium.
6. Schrijf /plak de patiëntgegevens op het buisje.

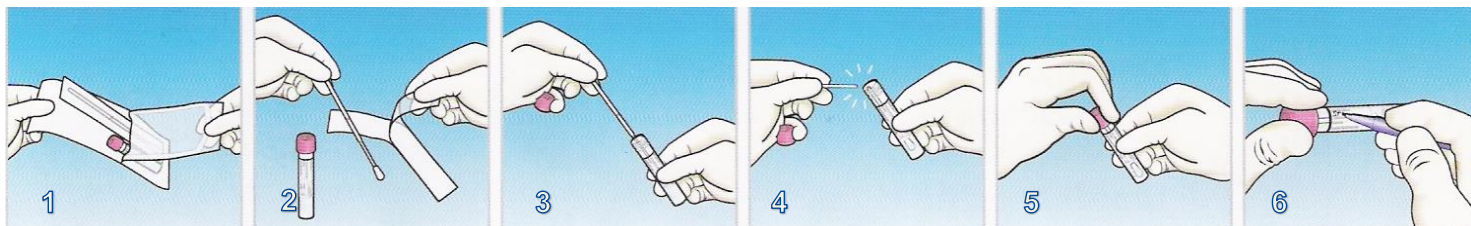

Aanvraagformulier:

Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (niet met viltstift of vulpen).

Voor aanvullende informatie zie het Vademecum van Labmicta (www.labmicta.nl/vademecum).

Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden. Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:

- Plaats de E-swab en de Aptima in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.
- De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.
- De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.
- Dit instructieformulier terugplaatsen in de zegroene envelop, voor de kartonnen inlay met het retouradres en **VOL** naar voren.
- De afnameset zo snel mogelijk afgeven voor transport.
- Voor transport in de koelkast bewaren.
- Bij de huisartsenpraktijk zijn de transportmogelijkheden naar Labmicta bekend.
- Voor een optimaal resultaat binnen 24 uur retourneren aan Labmicta.